

MASQUE FENETRE TRANSPARENTE LAVABLE

MA00036

Catégorie 1 – 50 lavages



DESRIPTIF

Masque de protection à fenêtre transparente avec barrette nasale et réglers d'élastiques. Les masques à fenêtres sont idéals pour les personnes sourdes, malentendantes et dans les milieux professionnels en contact avec le public. Ils permettent une communication des expressions du visage, mouvements des lèvres et sourires.

RESULTAT DE LA PERFORMANCE

Perméabilité à l'air règlementaire $> 96 \text{ L.m}^2.\text{S}$
1 pour une dépression de 100 Pa : conforme mesuré à >806
Efficacité de protection aux aérosols aux particules de $3\mu\text{m}$: conforme à 95 %
Résultat : masque de catégorie 1

CERTIFICATIONS

IFTH 21-00068 du 14/01/2021
Respecte les critères spécifiques aux masques à fenêtres proposés par la DGA en accord avec la GDS, DGT et l'ANSM suite à la note inter ministérielle du 29 mars et révisée le 26 avril.

CONSEIL DE STOCKAGE

Masques non utilisés à stoker propres et secs, dans un emballage propre hermétique et à l'abri de la lumière.

CARACTERISTIQUES

Matières

- Couche 1 : 100% polypropylène 70g/m^2
- Couche 2 : 100% polypropylène 70g/m^2
- Fenêtre : PET antibuée

Barette nasale

Liens élastiques avec réglers

Dimensions : 20 x 7cm

Coloris : blanc

Durée d'utilisation : 4 heures

Utilisation : résistant à 50 lavages

CONDITIONNEMENT


Individuel
Carton de 100 pièces



ENTRETIEN

IMPORTANT :

La longévité de ce masque dépendra de la façon dont l'entretien sera respecté. Ne pas sur laver et ne respectant pas les températures indiquées ci-dessous et en ne rallongeant pas chaque durée préconisée. En suivant ces instructions, ce masque a été conçu pour une durée d'utilisation supportant 50 lavages. Au-delà et afin de garder toute ses spécificités de filtration et de perméabilité à l'air d'origine, il est fortement recommandé de le changer.

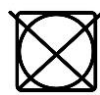

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations.

Température de lavage : 60 °C - Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante Essorage réduit à 600 tours/minute maxi - Utiliser une lessive normale ne contenant pas d'agent de blanchiment - Ne pas rajouter d'adoucissant - DUREE : MAXIMUM 30 mn. (il est conseillé d'effectuer le lavage en le mélangeant à d'autres articles pour éviter un frottement important sur le tambour accentuant une usure prématurée et utiliser un filet de lavage).
Veiller à utiliser de l'eau et du savon pour nettoyer l'intérieur de la visière.

Ne pas utiliser de gel hydroalcoolique.

Chlore interdit – CONSIGNE COVID-19 (eau de Javel, etc.) ou produits contenant des agents de blanchiment oxygénés.

Laisser sécher à l'air libre.

Ne pas repasser.

ERGONOMIE ET ADAPTABILITE



La bonne adaptation du masque au visage est un élément déterminant : une mauvaise adaptation au visage réduit de 60% l'efficacité de la filtration. Seul un masque adapté au visage du porteur et correctement mis en place garantira une parfaite étanchéité et donc la protection du porteur.

Adaptation du masque au visage du porteur :

- Masque barrière de taille standard « unisexe » adapté à la morphologie de la majorité des visages.
- Il épouse parfaitement le visage du porteur, couvrant ainsi le nez, la bouche et le menton, avec un ajustement individualisé.
- La barrette de nez (clip nasal) se règle facilement, évitant ainsi toute fuite par-dessus le masque.
- Nos masques barrières sont portés par le personnel de notre entreprise

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

1. Laver les mains avant de mettre le masque.
2. Déplier le masque, le tenir par le haut (barrette nasale) et passer les doigts dans les élastiques (côté coloré à l'extérieur).
3. Placer le masque devant le nez et la bouche en incluant le menton.
4. Passer les élastiques derrière les oreilles et ajuster avec les réglers.
5. Modeler la barrette et ajuster-la au contour du nez avec les deux index.
6. Assurer l'étanchéité du masque : le nez, la bouche et le menton doivent être recouverts.
7. Laver les mains après avoir mis le masque.

- Une fois mis en place, le masque ne doit plus être touché.
- Une fois enlevé, il ne doit pas être réutilisé.
- Il doit être changé immédiatement, chaque fois qu'il est souillé ou mouillé.
- Ne pas réutiliser, ne pas le conserver autour du cou.
- Eliminer le masque après utilisation.

